



Gebrauchsanweisung HeltiQ Warzen Vereiser

- Vor dem Gebrauch lesen Sie die Gebrauchsanweisung -
Nur für äußere Anwendung geeignet - Basiert auf der Vereisungsmethode (Kryotherapie)
- Nicht bei Kindern unter 4 Jahren verwenden -



Gebrauchsanweisung HeltiQ Warzen Vereiser

- Vor dem Gebrauch lesen Sie die Gebrauchsanweisung -
Nur für äußere Anwendung geeignet - Basiert auf der Vereisungsmethode (Kryotherapie)
- Nicht bei Kindern unter 4 Jahren verwenden -

REF: 140005
740166 - V2.0103032

INHALT VON DIESEM GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Inhalt HeltiQ Warzen Vereiser
2. Diagnose
3. Gebrauchsanweisung hand- und fußwarzen
4. Nach der behandlung
5. Nebenwirkungen
6. Kontraindikation
7. Warnhinweise


1. INHALT HELTIQ WARTZEN VEREISER



- 1 Sprühdose 38 ml Dimethylether mit Kappe
- 1 Gebrauchsanweisung
- 8 Pflaster
- 16 Reinigung Tücher

2. DIAGNOSE

Wenn Sie nicht sicher sind, ob es sich um eine Warze handelt, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

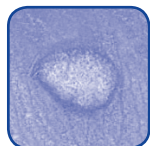

- Hart und rauch
- Blumenkohlartige Oberfläche
- Meist an Händen und Füßen
- Warzengröße vom 3 bis 6 mm

3. GEBRAUCHSANWEISUNG HAND- UND FUßWARZEN


Die plastikkappe nicht von der Sprühdose entfernen!

Mit dem lineal die Warzengröße messen und anschließend durch Drücken der Sprühdose folgendermaßen behandeln.

Warzengröße	Behandlung
3 mm (oder kleiner)	3 mal kräftig drücken
5 mm	4 mal kräftig drücken
6 mm (oder größer)	5 mal kräftig drücken



1 Die Warze so nach oben halten, daß die nach unten gerichtete Öffnung der Kappe über die Warze gestülpt wird. Dabei muß der Rand der Kappe auf die Haut um die Warze herum aufgesetzt werden.

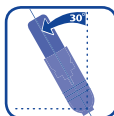

Für die meist effektive Behandlung verwenden Sie die Sprühdose vertikal. Maximale Abweichung von 30°.



2 Die Kappe gut festhalten und wie oben beschrieben 3 bis 5 mal mit dem Daumen kräftig auf die Sprühdose drücken. Die Kappe danach erst nach weiteren 10 Sekunden von der Warze entfernen.

Wenn Sie mehr als 2 Warzen behandelt haben, ist es ratsam, mindestens eine Minute zu warten, bis die Kappe wieder auf Zimmertemperatur abgekühlt ist. Die Öffnung der Kappe nach Gebrauch mit dem beigefügten Reinigungstuch reinigen.

Bei hartnäckigen oder sehr empfindlichen Warzen kann eines der mitgelieferten Spezialpflaster nach der Behandlung zusätzliche Schutz bieten.

ACHTUNG!

In den meisten Fällen ist eine einzelne Behandlung ausreichend. Bei hartnäckigen Warzen kann die Behandlung nach 2 Wochen wiederholt werden. Manchmal hilft es auch, die Warze vorher anzufeuchten. Die Warze nicht öfter als 4 Mal (jeweils im Abstand von 2 Wochen) behandeln; wenn danach kein Erfolg erzielt wurde, wenden Sie sich an Ihren Arzt. Wenn es um eine Gruppe von dicht nebeneinander liegenden Warzen geht, empfiehlt es sich, jede Warze einzeln in einem Abstand von 2 Wochen zu behandeln. Es ist möglich bei der Behandlung von hartnäckigen Warzen, nach 10 Sekunden Wartezeit nochmals zu behandeln.

4. NACH DER BEHANDLUNG

Nach der Behandlung kann eine Blase entstehen; diese Blase nicht aufstechen! Während oder unmittelbar nach der Behandlung kann es zu einem leicht schmerzenden oder juckenden Gefühl kommen, das allmählich verschwindet. Die behandelte Warze nicht berühren oder daran kratzen. Die behandelte Oberfläche sauber halten und Infektionen vermeiden. Schwimmen und Duschen ist erlaubt.

5. NEBENWIRKUNGEN

Bei der Behandlung durch Vereisen können sich lokal auf der Haut weiße Flecken bilden (Verringerung der Pigmentierung); diese Flecken werden jedoch nach einiger Zeit wieder verschwinden. Wenn von der Gebrauchsanweisung abgewichen wird, kann es zu Erfrierungserscheinungen, Hautschäden oder Narbenbildung kommen. Wenden Sie sich bei einer Entzündung und/oder anderen Komplikationen an Ihren Arzt.

6. KONTRAINDIKATION

HeltiQ Warzen Vereiser nicht verwenden:

- Wenn eine bestätigte Diagnose von Krebs und eine Behandlung von Krebs vorliegt oder vorgelegen hat
- Bei Kindern unter 4 Jahren
- Bei Personen mit Diabetes oder Kreislaufstörungen
- Personen mit Immunsuppressivum Medikamente
- Bei HIV-infizierten Personen
- Wenn die Haut gereizt oder entzündet ist
- Bei einer Hauterkrankung oder man ist sich nicht sicher, ob es sich um eine Warze handelt
- Im Gesicht
- Für die Behandlung von genitalen Warzen
- Auf Muttermalen
- Dunklen (gegebenenfalls behaarten) Flecken
- Schönheitsflecken oder anderen eigenartig aussehenden Hauterkrankungen
- Auf eine sehr dunkle Haut
- Bei Kälteallergie (urticaria)
- In Kombination mit einer anderen Warzen-Behandlung

7. WARNHINWEISE

- Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Aerosol nicht einatmen
- Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten
- Nicht rauchen
- Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch
- Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen
- Vor Sonnenbestrahlung schützen
- Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen
- Kühl und trocken lagern
- Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen Vorschriften

Wenn Sie HeltiQ Warzen Vereiser verwenden möchten während Sie schwanger sind oder stillen konsultieren Sie vor den Behandlung unbedingt Ihren Arzt.

BESCHWERDEN UND KUNDENDIENST

Kontaktieren Sie den Hersteller für Fragen oder eine Nebenwirkung zu melden. Beschwerden und Fragen können auch gemeldet werden über www.warzenvereiser.de.



Since 1880

Produziert bei:

Koninklijke Utermöhlen N.V.
De Overweg 1, 8471 ZA Wolvega
Niederlande +31 (0)561 69 33 66
www.warzenvereiser.de



0344