



Gebrauchsanweisung für HeltiQ Stielwarzen Vereiser

- Nur zur äußerlichen Anwendung -
- Nur zur Entfernung von Stielwarzen bei Personen über 18 Jahren bestimmt -

Gebrauchsanweisung für HeltiQ Stielwarzen Vereiser

- Nur zur äußerlichen Anwendung -
- Nur zur Entfernung von Stielwarzen bei Personen über 18 Jahren bestimmt -



REF: 45001
741151_V3_20181126




Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die Gebrauchsanweisung. Verwenden Sie das Produkt wie angegeben. Wenn es nicht wie angegeben verwendet wird, kann es zu Kälteschäden kommen.



Nicht verwenden, wenn der Spender oder die Verpackung beschädigt ist.

INHALT HELTIQ STIELWARZEN VEREISER

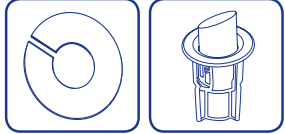

- 1 38-ml-Spender mit fest angebrachter Applikatorkappe; enthält Dimethylether (DME)
- 1 Gebrauchsanweisung
- 8 Schutzpflaster
- 8 Schaumstoffstöpsel

PRODUKTBESCHREIBUNG

HeltiQ Stielwarzen Vereiser ist ein kryochirurgisches Produkt für die Behandlung von Stielwarzen unter den Armen, im Nacken-/Halsbereich oder unter den Brüsten. Stielwarzen können durch Vereisung (Kryotherapie) entfernt werden.

ERKENNEN VON STIELWARZEN

Stielwarzen werden auch als weiche Fibrome bezeichnet; sie treten häufig sowohl bei Männern als auch bei Frauen auf und sind gutartig. Stielwarzen sind nicht ansteckend. Sie treten spontan auf. Eine Stielwarze hat folgende Merkmale: hautfarben, weich und schmerzlos, leicht zu bewegen, hervorstehend und mit kleinem Stiel.

ANWENDUNGSGEBIETE/VERWENDUNGSZWECK

Das Produkt ist angezeigt für die Entfernung von Stielwarzen am Nacken/Hals, unter den Armen und unter den Brüsten.

Das Produkt ist ein rezeptfreies Medikament und für die Anwendung bei Personen über 18 Jahren bestimmt.

GEGENANZEIGEN

HeltiQ Stielwarzen Vereiser darf nicht angewendet werden:

- Wenn eine bestätigte Krebsdiagnose vorliegt und/oder eine Krebsbehandlung erfolgt
- Bei Stielwarzen mit einer Größe über 4 mm. Große Stielwarzen können nicht mit dieser Methode behandelt werden
- Wenn die Farbe der Stielwarze sich von der Farbe der umgebenden Haut unterscheidet
- Bei Stielwarzen am Gesäß oder im Anal- oder Genitalbereich
- Wenn die Haut stark pigmentiert ist oder auf dunkel pigmentierter Haut
- Wenn die Stielwarze behaart ist oder Haare enthält. Wenn die Stielwarze hart ist oder blutet
- Bei gereizter, infizierter oder empfindlicher Haut
- Wenn eine Überempfindlichkeit oder Allergie gegen extreme Kälte besteht (Kälteurtikaria)
- Bei Diabetikern und Personen mit Kreislaufproblemen (Raynaud-Krankheit)
- Bei Personen unter Immunsuppressiva oder bei einer bestätigten Diagnose einer Autoimmun- oder Bindegewebskrankung
- Bei gereizter, infizierter oder empfindlicher Haut
- Bei Vorliegen einer HIV-Infektion
- Bei Personen, die blutgerinnungshemmende Medikamente einnehmen, sowie bei Blutern
- Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren
- In Kombination mit anderen Behandlungen für Stielwarzen

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- Hochentzündlicher Spender. Der Spender steht unter Druck. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten
- Nicht rauchen
- Nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt
- Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung
- Nicht gegen offene Flammen oder andere Zündquellen sprühen
- Den Spender nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Das Spray nicht einatmen
- Kontakt mit den Augen vermeiden. Nicht in die Augen sprühen, da dies zu Kälteschäden und Blindheit führen kann
- Die Behandlung nicht häufiger als 4 Mal mit Abständen von 2 Wochen zwischen den Behandlungen wiederholen. Wenden Sie sich an einen Arzt, wenn die Warze dann nicht verschwunden ist
- Das Produkt kann Kälteschäden, Depigmentierung oder Narbenbildung hervorrufen, wenn es nicht gemäß dieser Gebrauchsanweisung angewendet wird
- Wenden Sie sich an einen Arzt, wenn Sie schwanger sind oder stillen

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vorsichtsmaßnahme: Die fest angebrachte Applikatorkappe nicht vom Spender abnehmen.



Ein Schutzpflaster um die zu behandelnde Stielwarze kleben.



Einen Schaumstoffstöpsel-Halter in die Öffnung an der Oberseite der Applikatorkappe stecken. Den Halter vorsichtig in die Öffnung drücken.

Der Spender in umgekehrter Position halten, wobei der Halter und der Schaumstoffstöpsel nach unten zeigen.



Mit dem Daumen 4-mal fest auf die Unterseite des Spenders drücken, um den Schaumstoffstöpsel zu durchtränken. 10 Sekunden warten, bis der Schaumstoffstöpsel die benötigte Temperatur erreicht hat.



Den Schaumstoffstöpsel 40 Sekunden lang vorsichtig an die Stielwarze halten.



Das Schutzpflaster, das die Stielwarze umgibt, direkt nach der Behandlung entfernen.



Den Schaumstoffstöpsel vorsichtig aus der Öffnung der Applikatorkappe durch Herausziehen aus dem Halter entfernen.

Vorsichtsmaßnahme: Die beiliegenden Schaumstoffstöpsel sind Einwegartikel; sie sind nicht zur Wiederverwendung bestimmt. Für jede zu behandelnde Stielwarze einen neuen Schaumstoffstöpsel verwenden. Die Oberfläche des gebrauchten Schaumstoffstöpsels nicht berühren.

Vorsichtsmaßnahme: den Schaumstoffstöpsel nicht auf die Stielwarze platzieren.

Vorsichtsmaßnahme: der Spender vom Körper entfernt halten. Nicht auf Personen richten.

Vorsichtsmaßnahme: Falls mehrere Stielwarzen nahe beieinander liegen, jede Stielwarze separat im Abstand von einem Tag zwischen den Behandlungen vereisen.

Vorsichtsmaßnahme: Den Schaumstoffstöpsel von anderen Hautflächen fernhalten. Der Kontakt mit einem gebrauchten Schaumstoffstöpsel kann zu Erfrierungen der Hautoberfläche führen.

Vorsichtsmaßnahme: Falls die Stielwarze nach 14 Tagen noch nicht verschwunden ist, die Behandlung wiederholen. Eine Stielwarze nicht häufiger als 4-mal im Abstand von jeweils 14 Tagen behandeln. Fragen Sie einen Arzt um Rat, wenn die Behandlung nicht die gewünschte Wirkung zeigt.

NACH DER BEHANDLUNG

- Die Behandlung kann zur Blasenbildung führen. Stechen Sie die Blase nicht ein, wenn dies der Fall ist
- Die Stelle oder Warze, die behandelt wurde, nicht anpicken oder ankratzen
- Halten Sie den behandelten Bereich trocken und sauber, um eine Infektion zu vermeiden
- Sie können wie normalerweise auch schwimmen gehen, sich waschen, Baden und Duschen

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

- An einem dunklen und trockenen Ort aufbewahren. Eine Lagertemperatur von 25 °C nicht überschreiten
- Entsorgen Sie den Inhalt/Behälter entsprechend den lokalen Vorschriften

MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN

- Die Kryotherapie kann Hypopigmentierung (helle Flecken) oder Hyperpigmentierung (dunkle Flecken) hervorrufen. Die verschwinden im Laufe der Zeit wieder
- Blutung
- Blasenbildung
- Narbenbildung, wenn die Vereisung länger als angegeben erfolgt
- Vorübergehende Beschwerden, wie Schmerzen oder Kribbeln
- Wenden Sie sich bei einer Infektion und/oder Komplikationen an einen Arzt

REKLAMATIONEN UND KUNDENDIENSTUNTERSTÜTZUNG

Wenden Sie sich an den Vertriebshändler oder die Webseite www.heltiq.de wenn Sie Fragen haben, oder Probleme melden wollen.



Produziert bei:

Koninklijke Utermöhlen NV
De Overweg 1, 8471 ZA Wolvega
Niederlande +31 (0)561 69 33 66
www.heltiq.de

