




# Gebrauchsanweisung HeltiQ Skintags

- Vor dem Gebrauch lesen Sie die Gebrauchsanweisung -  
Nur für äußere Anwendung geeignet - Nicht bei Kindern unter 4 Jahren verwenden -  
Basiert auf der Vereisungsmethode (Kryotherapie)


## INHALT VON DIESES GEBRAUCHSANWEISUNG

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Inhalt HeltiQ Skintags | 5. Nebenwirkungen   |
| 2. Diagnose Stielwarzen   | 6. Kontraindikation |
| 3. Gebrauchsanweisung     | 7. Warnhinweise     |
| 4. Nach der Behandlung    |                     |

### 1. INHALT HELTIQ SKINTAGS

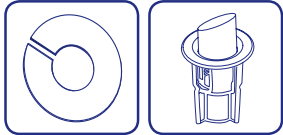

- 1 Sprühdose mit durchsichtiger Kappe
- 1 Gebrauchsanweisung
- 8 Schutzpflaster
- 8 Filterapplikatoren

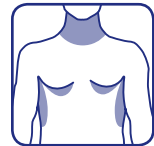

### 2. DIAGNOSE VON STIELWARZEN

Skintags/Stielwarzen ( Acrochordons/Fibromen) genannt, kommen sowohl bei Frauen als auch bei Männern vor. Stielwarzen sind harmlos und nicht ansteckend. Sie sind meistens am Hals, Nacken unter den Achseln und Brüsten zu finden. Nur bei Stielwarzen an diesen Stellen können Sie den HeltiQ Skintags verwenden.

- Fleischfarbig
- Weich und beweglich
- Schmerzlos
- Ausstülpung auf einem schmalen Stiel Bild



### ACHTUNG

In den meisten Fällen ist bereits eine Behandlung ausreichend. Falls Stielwarzen sehr dicht beieinander liegen, empfiehlt es sich jede einzeln zu behandeln. Wenn Sie mehr als 2 behandeln müssen, ist es ratsam einen Tag zu warten. Bei hartnäckigen Stielwarzen die Behandlung nach 2 Wochen wiederholen.

### 3. GEBRAUCHSANWEISUNG

Die Plastikcappe auf gar keinen Fall von der Sprühdose entfernen



1 Schutzpflaster auf die den Fuß der Stielwarze umgebende Haut kleben.



2 Sprühdose bei der Kappe festhalten, Applikator in die Öffnung der Sprühdose drücken, mit der Öffnung nach vorn , nicht auf den Körper gerichtet.



3 Die nach unten gerichtete Sprühdose **4x kräftig** mit dem Daumen drücken, dann wird der Filter feucht. **10 Sekunden warten**, Sprühdose bleibt nach unten gerichtet , immer vom Körper weg.



4 Drücken Sie den Applikator leicht gegen die Stielwarze, **40 Sekunden festhalten!**



5 Schutzpflaster entfernen



6 Applikator zum Entsorgen aus der Kappe entfernen, dabei die Sprühdose nach unten richten.

Nicht mehr als 2 beieinanderliegende Stielwarzen behandeln.

Derhygiënische Einmal- Applikator nur für eine Person und Behandlung verwenden.

Nicht die Oberfläche des benutzten Applikators mit den Fingern berühren. Durch die Kälte des Filters kann Haut vereisen.

# Gebrauchsanweisung HeltiQ Skintags

- Vor dem Gebrauch lesen Sie die Gebrauchsanweisung -  
Nur für äußere Anwendung geeignet - Nicht bei Kindern unter 4 Jahren verwenden -  
Basiert auf der Vereisungsmethode (Kryotherapie)

## 4. NACH DER BEHANDLUNG

- Während oder unmittelbar nach der Behandlung kann es zu einem leicht schmerzenden oder juckenden Gefühl kommen, das allmählich verschwindet.
- Nach der Behandlung kann eine Blase entstehen, diese bitte nicht aufstechen!
- Die Blasenbildung ist meistens ein Zeichen für die erfolgreiche Behandlung
- Die behandelte Warze nicht berühren oder daran kratzen.
- Die behandelte Oberfläche sauber halten und Infektionen vermeiden.
- Schwimmen und Duschen ist erlaubt.

## 5. NEBENWIRKUNGEN

Bei der Behandlung durch Vereisen können sich lokal auf der Haut weiße Flecken bilden(Verringerung der Pigmentierung); die jedoch nach einiger Zeit wieder verschwinden. Wenn von der Gebrauchsanweisung abgewichen wird, kann es zu Erfrierungserscheinungen, Hautschäden oder Narbenbildung kommen. Wenden Sie sich bei einer Entzündung und/oder anderen Komplikationen an Ihren Arzt.

## 6. KONTRAINDIKATION

HHeltiQ Skintags nicht verwenden:

- Stielwarzen mit einem diameter größer als 4mm
- Seltsam aussehenden Hauterkrankungen oder man ist nicht sicher ob es sich um eine Stielwarze handelt
- Wenn eine bestätigte Diagnose von Krebs und eine Behandlung von Krebs vorliegt oder vorgelegen hat
- Bei Kindern unter 4 Jahren
- Bei Personen mit Diabetes oder Kraufslaufstörungen (Raynaud)
- Personen mit Immunsuppressivum Medikamente
- Bei HIV-infizierten Personen
- Wenn die Haut gereizt oder entzündet ist
- Auf empfindliche Haut; Hals, Gesäß, unter den Achseln oder Brüst
- Muttermalen, Schönheitsflecken, dunkle (haarige) Flecken
- Im Gesicht
- Auf eine sehr dunkle Haut oder pigmentierte Haut
- Für die Behandlung von genitalen Warzen
- Bei Kälteallergie (urticaria)
- In Kombination mit einer anderen Stielwarzen-Behandlung

## 7. WARNHINWEISE

- Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Aerosol nicht einatmen
- Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten
- Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch
- Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen
- Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen
- Sprechen Sie in einem kühlen und trocknen Bereich maximale Raumtemperatur
- Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen Vorschriften

Wenn Sie den HeltiQ Skintags während der Schwangerschaft oder Stillzeit anwenden möchten, fragen Sie bitte vorher sowie in allen Zweifelsfällen Ihren Arzt.

## BESCHWERDEN UND KUNDENDIENST

Kontaktieren Sie den Hersteller für Fragen oder eine Nebenwirkung zu melden. Beschwerden und Fragen können auch gemeldet werden über [www.skin-tags.de](http://www.skin-tags.de)



Since 1880

Produziert bei:

Koninklijke Utermöhlen NV  
De Overweg 1, 8471 ZA Wolvega  
Niederlande +31 (0)561 69 33 66  
[www.skin-tags.de](http://www.skin-tags.de)



REF 145001  
741151 - V2.01/6/923



0344